



STRATOS MASK

MASQUE HYGIÉNIQUE DE PROTECTION GÉNÉRIQUE
POUR UN USAGE QUOTIDIEN





STRATOS MASK

STRATOS MASK EST LE MASQUE HYGIÉNIQUE DE PROTECTION GÉNÉRIQUE QUE LA SPORTIVA A CONÇU POUR UN USAGE QUOTIDIEN PENDANT LA PHASE DE COEXISTENCE AVEC LE VIRUS COVID-19.

Pour limiter au maximum la propagation du Coronavirus, il est en effet nécessaire que chacun de nous porte un masque afin d'éviter de transmettre par inadvertance le virus à d'autres personnes. Stratos Mask enveloppe de manière ergonomique le visage de la personne qui le porte en évitant la dispersion des gouttelettes de salive qui pourraient contenir le virus.

Il est conçu pour des utilisateurs **dynamiques** c'est pourquoi la plus grande attention a été portée au **confort**, à la **stabilité**, à la **respirabilité** et à la **sécurité**.

TECH INFO

Stratos Mask est le **masque hygiénique de protection générique** en tissu mesh 3D avec filtre interne de filtration bactérienne interchangeable et certifié. Le masque est un produit lavable, réutilisable et confortable à porter grâce à son ergonomie parfaitement étudiée et conçue pour masquer le visage en toute sécurité et confortablement.

La Sportiva propose **Stratos Mask** pour une utilisation quotidienne grâce au confort élevé et à la facilité de remplacement du filtre.

- 1 **Forme ergonomique** et enveloppante.
- 2 **Tissu 3D-Mesh** pour une respiration supérieure avec un traitement antibactérien et antiviral ViralOff by Polygiene.
- 3 **Cadre de support flexible** pour plus de confort et de respirabilité.
- 4 **Sensitive Comfort Layer™**: iguêtres internes en Lycra® moelleux sur le nez et le menton pour plus de confort.
- 5 **Élastiques réglables** pour un ajustement précis et sûr.
- 6 **Filtre interne** en polypropylène melt blown **certifié** pour la filtration bactérienne et facilement interchangeable.
- 7 **Trou** pour vérifier le bon montage du filtre.



20



S (kid) / M / L



Attention: le filtre est conforme à la norme en vigueur. Toutefois, le masque Stratos Mask ne doit pas être considéré comme un dispositif médical.



Traitement antiviral et antibactérien ViralOff by Polygiene

Tous les autres composants du masque sont traités avec **ViralOff by Polygiene**, qui garantit la réduction de 99 % des virus et bactéries en moins de 2 heures (ISO 18184:2019). Cela permet d'avoir un masque toujours propre à chaque utilisation. Grâce au traitement ViralOff, il n'est pas nécessaire de laver le masque après chaque utilisation.



Filtre interchangeable en polypropylène

Le Stratos Mask intègre un filtre monocouche certifié, facilement remplaçable grâce à des sangles pratiques. Il permet de filtrer environ **99 % des bactéries et virus** émis par la bouche, exactement comme requis pour les masques chirurgicaux selon la norme EN ISO 14683:2019.



Quand faut-il remplacer le filtre?

Il est conseillé de remplacer le filtre quotidiennement, et plus fréquemment en cas d'utilisation intense comme une activité sportive ou une utilisation pendant plusieurs heures consécutives au travail. En cas d'utilisation intensive, La Sportiva recommande un remplacement toutes les **4 heures**. Le masque est un accessoire durable qui peut être lavé et porté plusieurs fois. Il convient de savoir que le traitement antibactérien ViralOff diminue progressivement avec le temps en raison de l'usure normale des matériaux après le lavage.



Attention: il est recommandé de toujours se laver les mains avant et après l'utilisation..





CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL



HYGIÉNIQUE

Le tissu 3D Mesh est certifié et produit en Europe.
C'est un tissu hygiénique et anti-allergène.



DURABLE

L'utilisation d'un masque lavable et réutilisable par rapport à un masque jetable contribue à la protection de l'environnement. La plus petite surface du filtre par rapport à celle nécessaire pour produire des masques sanitaires contient également davantage de déchets.



RÉSISTANT

Le tissu du cadre du masque est résistant à l'abrasion et durable, même après plusieurs lavages.



LAVABLE

Une fois le filtre retiré, le masque peut être complètement lavé à la main ou en machine à 40 °C.



RESPIRANT

Le tissu 3D Mesh et la forme ergonomique tridimensionnelle rendent le produit très respirant.



CONFORTABLE

Les guêtres internes en Lycra® soft touch permettent un confort maximal.



ADAPTABLE

Il est possible d'ajuster l'ergonomie en soulevant la partie couvrant le menton et en abaissant le couvre-nez pour plus de respirabilité.




TRAITEMENT ANTIVIRAL

Le tissu 3D Mesh et les inserts en Lycra® adoptent le traitement antibactérien et antiviral Polygiene ViralOff.




PATENT PENDING



MODE D'EMPLOI

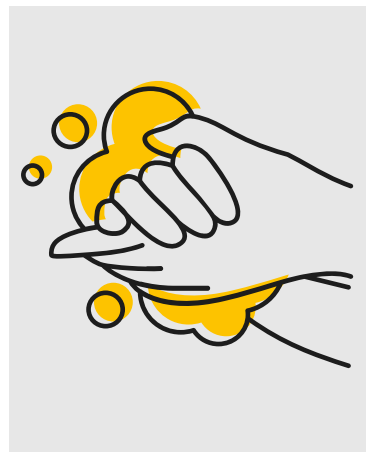

- ① Lavez-vous les mains et le visage avant de manipuler et de mettre le masque et le filtre.

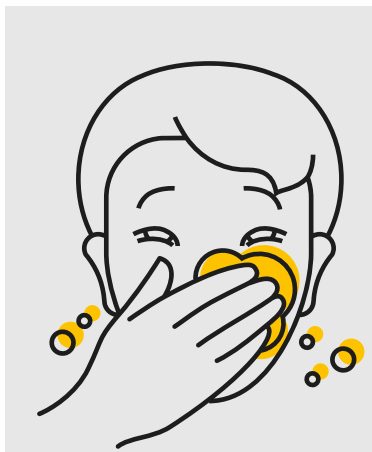


- ② Portez-le en le plaçant sur votre visage et en passant les attaches derrière votre tête.

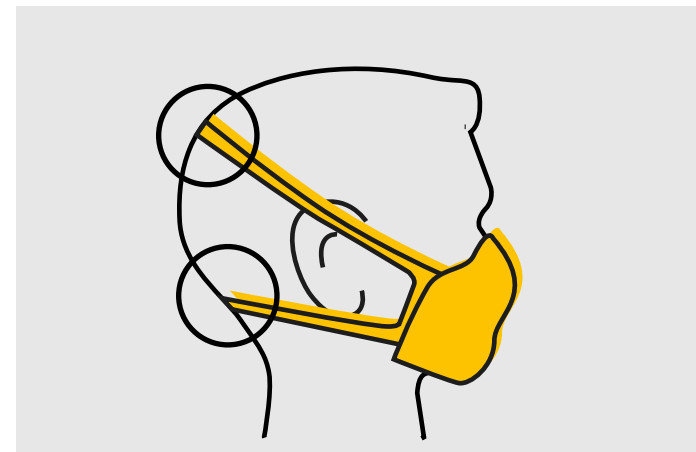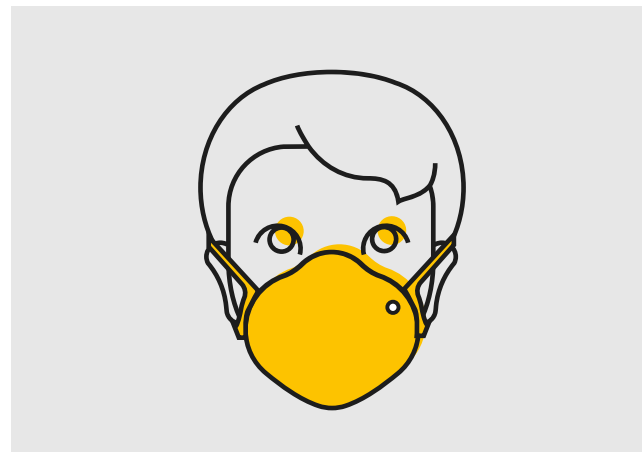


- ③ Réglez la tension des attaches. Elles doivent adhérer correctement au visage sans créer un espace vide.




COMMENT RETIRER ET CHANGER LE FILTRE

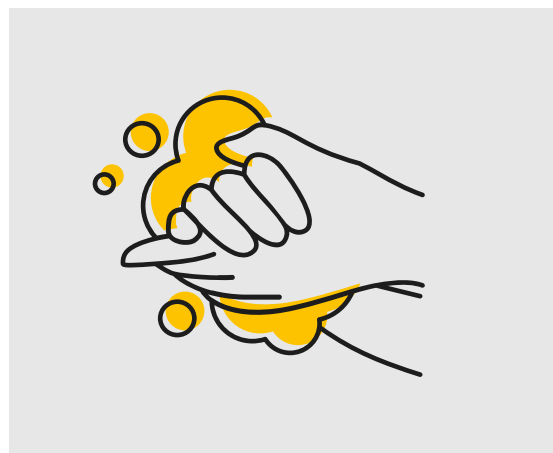


- ① Lavez-vous soigneusement les mains avant de retirer le filtre de l'emballage.

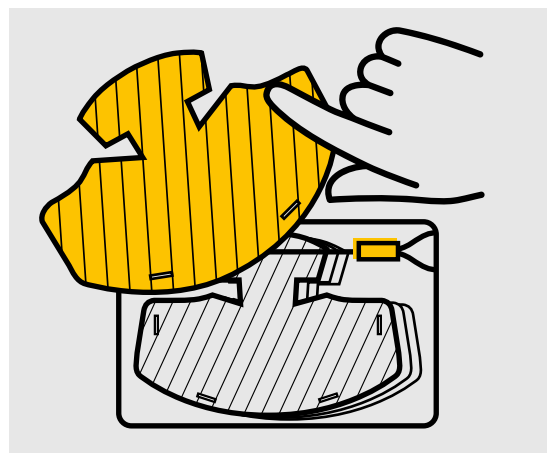


- ② Refermez l'emballage immédiatement après avoir retiré un des 30 filtres à usage unique.

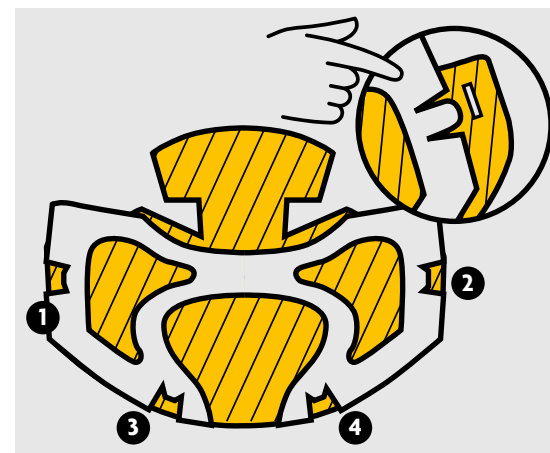

- ③ Montez le filtre sur le cadre interne suivant l'ordre indiqué sur la figure.

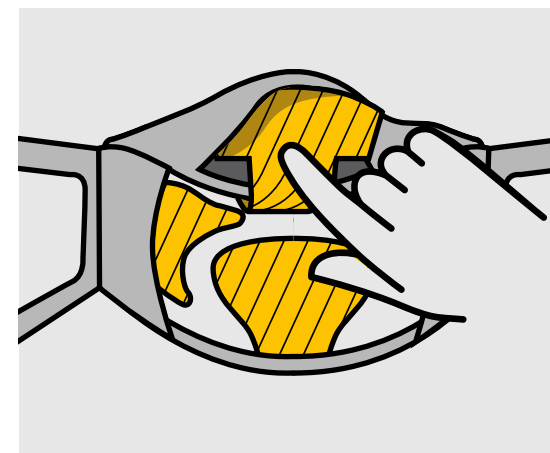

- ④ Insérez le cadre dans le masque, garder le filtre à l'extérieur en contact avec le masque.

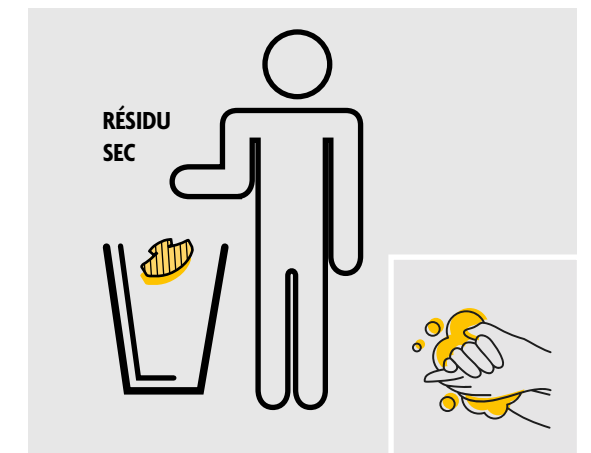

- ⑤ Pour le retirer, procédez dans l'autre sens: soulevez les languettes et retirez le filtre. Le filtre doit ensuite être jeté à la poubelle en tant que **résidu sec**.

Lavez-vous soigneusement les mains une fois terminé.

LAVABLE ET RÉUTILISABLE



Le **STRATOS MASK** peut être lavé à la main ou en machine à 40 °C, après avoir soigneusement retiré le filtre et les attaches élastiques. La possibilité de lavage rend le masque durable et contribue à la réduction des déchets par rapport à un masque jetable. Toutefois, il est conseillé que, même après le lavage, le Stratos Mask soit utilisé pour un usage exclusivement personnel. Évitez de le prêter à une autre personne, même si cette personne est de la famille.

Le nettoyage à sec est fortement déconseillé.



STRATOS MASK

